



## UPUTSTVO ZA PRIKUPLJANJE I SLANJE UZORKA BRISA SLUZOKOŽE USNE DUPLJE


1. Izvaditi omot sa kolektorom iz seta za uzimanje uzorka.
2. Otvoriti omot i izvaditi kolektor koji se sastoji od štapića sa vatiranim vrhom i sterilne zaštitne tubice.

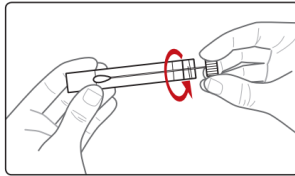

3. Na predviđeno mesto na zaštitnoj tubici upisati ime i prezime osobe čija će se DNK analizirati kao i datum uzimanja uzorka.

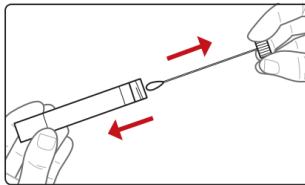

4. Izvaditi štapić sa vatiranim vrhom iz sterilne zaštitne tubice pazeći pri tome da se vatirani deo ne dodiruje rukama.

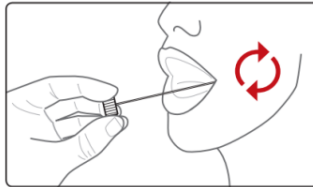

5. Vatiranim delom štapića protrljati 10 puta levu i 10 puta desnu stranu usne duplje (unutrašnja strana obraza).
6. Nakon uzimanja uzorka brisa sluzokože usne duplje pažljivo vratiti vatirani štapić u sterilnu zaštitnu tubicu pazeći pri tome da se ne dodiruje rukama ili o spoljašnju stranu zaštitne tubice.
7. Ostaviti da se osuši desetak minuta
8. Dobro zatvoriti tubicu
9. Kolektor sa uzetim uzorkom, zajedno sa popunjenim formularom dostaviti laboratoriji

- Kolektor nije predviđen za rukovanje deci mlađoj od 18 godina.
- Kolektor je u potpunosti sterilan i kao takav ne može izazvati nikakve nuspojave.
- Kolektor je namenjen isključivo za uzimanje uzorka brisa sluzokože usne duplje od jedne osobe na gore opisani način.
- Ne dodirivati vatirani vrh štapića kolektora prstima ili drugim predmetima!
- Paziti da uzorak bude dobro označen (ime i prezime) kao i da istovetni podaci budu upisani na za to predviđenom mestu na formularu!
- Uzorak čuvati na sobnoj temperaturi i ne ostavljati ga na izvor toplote ili sunčeve svetlosti!